

Radim

Bezplatný časopis nielen pre ľudí so stómiou vydávaný spoločnosťou Convatec Slovensko



Špeciálne vydanie

1/2023

- Zákaznícke centrum Convatec v Nitre na Slovensku
- Zdravá pokožka v okolí stómie je u nás na prvom mieste
 - Trápi vás podtekanie?
 - Novinky v roku 2024



program pre všetkých ľudí so stómiou



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo



convatec
— forever caring —



Milá čitateľka, milý čitateľ,

ako prvé: GRATULUJEME! Držite v rukách tohtoročné špeciálne vydanie časopisu pre všetkých ľudí so stómiou, ktorý vydáva naša spoločnosť.

ĎAKUJEME za to, že ste vyplnili Prihlášku do programu me+. Jednou zo služieb, ktorú vďaka tomuto

Zdravé putá

programu získavate, je bezplatné zasielanie časopisu Radim na vašu adresu. Tento časopis môžete brať ako navigáciu životom so stómiou, v ktorom sa zameriavame hlavne na novinky v oblasti produktov na starostlivosť o stómiu, na zvládanie aktivít so stómiou, a ponúkame vám tiež riešenia na zvládanie možných komplikácií spojených so stómiou. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce fyzické problémy spojené so stómiou patria kožné problémy v okolí stómie. My vám ponúkame riešenie ako súvislosť medzi príčinou podtekania a kožnými problémami odstrániť. Prečítajte si o tom v článku na strane 16.

Čo všetko ešte program me+ prináša ľuďom so stómiou, nájdete na strane 39.

Budeme radi, ak sa touto cestou medzi vami a nami vytvorí pevné zdravé puto, ktorému budete dôverovať. Dôvera je to, čo získavate od nás, ako

inovátora v oblasti hydrokoloidov a v starostlivosti o stómiu už viac ako 40 rokov.

Keď sme pre vás pripravovali toto číslo časopisu Radim, tak sme si uvedomili, ako čas rýchlo letí. Celý rok sme pre vás pracovali a pripravovali sa na množstvo skvelých noviniek v roku 2024. Niekoľko z nich vám prezradíme. Ale nie všetky. Pretože ako viete, v jednej rozprávke sa hovorí, že najviac tajomstiev majú detektívi.

Niečo však prezradíme a dozviete sa to, ak časopis prečítate až do konca. A kto sa dostane pri čítaní až k úplne poslednej strane, ten bude vedieť, že Vianoce a po nich nový rok 2024 sa nezadržateľne blížia a v mene celého kolektívu Convatec Slovensko vám prajem hlavne veľa šťastia. Bez šťastia nie je láska ani zdravie.

To ma naučil život sám!

Beata Galisková

Director, Marketing & Regulatory
Ostomy, AWC&CCC Slovakia



Obsah

- 4 Zákaznícke centrum Convatec v Nitre
- 6 SLOVILCO - Slovenské združenie stomikov Slovak Ostomy Association
- 8 Convatec vzdeláva budúcu generáciu sestier
- 10 Zdravá pokožka v okolí stómie je u nás na prvom mieste
- 16 Podtekanie a koža v okolí stómie
- 26 Čomu čelia ľudia so stómiou?
- 27 Novinky v roku 2024
- 28 Jednodielne urostomické vrečko Esteem®+ Accuseal™
- 34 Názov adhezívnych pásovk z Varimate Thin sa zmení na ESENTA™
- 35 Dotazník pre čitateľov časopisu Radim
- 36 Príbehy stomikov
- 37 Prihláška do programu me+™
- 38 Program me+™ vám toho ponúka veľmi veľa
- 40 Služby spoločnosti Convatec
- 41 Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
 pre volajúceho zadarmo



Pre viac informácií
 naskenujte QR kód



@convatecslovensko

Radim je bezplatný časopis nielen pre ľudí so stómiou vydávaný spoločnosťou Convatec

Č. 1/2023

Šéfredaktorka

PhDr. Beata Zabáková, PhD.

Redaktorka - koordinátorka

PhDr. Beata Zabáková, PhD.

REDAKČNÁ RADA

Predseda

PhDr. Beata Zabáková, PhD.

Členovia

Mgr. Simona Stanková

PhDr. Stela Gilanová, PhD.

Mgr. Anežka Smyková

Ing. Andrea Madajová

Ing. Dominika Netryová Zabáková

Mgr. Peter Snoha

Vydavateľ

Zákaznícke centrum Convatec

Unomedical, s.r.o.

Štúrova 71/A

949 01 Nitra, Slovensko

Bezplatná linka: 0800 800 111

Fotografie

Archív autorov

Archív spoločností Convatec,

EuroTec, ALP ecology

shutterstock.com

Jazyková korektúra

RNDr. Magdalena Borovcová

Grafické spracovanie

Linwe/KRAFT, s. r. o.

Tlač

Printline, s. r. o.

Napriek nášmu úsiliu, aby informácie boli presné a úplné, obsah príspevkov slúži len na všeobecnú informovanosť a v špecifických prípadoch sa na ne nedá odvolávať. Convatec nezodpovedá za obsah príspevkov, za správnosť informácií ani za názory uvedené v článkoch prispievateľov. Čitatelia, ktorí využijú informácie uvedené v časopise a budú podľa nich konať, tak robia na vlastnú zodpovednosť. Vo veciach týkajúcich sa vášho zdravotného stavu vždy kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Convatec si vyhradzuje právo na úpravu získaných článkov z dôvodu optimalizácie ich rozsahu.

Zákaznícke centrum Convatec v Nitre

V poslednom čísle časopisu Radim sme písali o tom, ako sa mení zdravotná starostlivosť o pacientov, lebo sa mení doba, v ktorej žijeme, a tak sa mení aj spoločnosť Convatec.

PhDr. Beata Zabáková, PhD., Director, Marketing & Regulatory Ostomy, AWC&CCC Slovakia

Zmena nastala nielen v našom logu, ale aj v prístupe k vám, našim zákazníkom. Dali sme sebe aj vám sľub „forever caring“.



convatec
— forever caring —

Spoločnosť Convatec prináša Forever caring spolu s novým logom, ktorého teplé farby vyjadrujú starostlivé ruky ľudí spoločnosti Convatec aj ruky poskytovateľov starostlivosti o pacienta, aby vytvorili jedno spoločné objatie alebo prítulenie - pacienti sú totiž stredobodom všetkého, čo spoločnosť Convatec a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti robia.

Vzhľadom na našu bohatú históriu plníme náš ďalší prísľub

Forever caring

„**Forever** (Neustála)“ hovorí o našom neochvejnom záväzku podporovať ľudí, ktorí žijú s nejakým zdravotným problémom, ich priateľov, a rodinu a zdravotnícky tím okolo nich.

Je to prísľub, že vždy budeme usilovnejšie pracovať, inovovať spôsoby, ako sa o nich postarať a urobiť ich život o niečo lepší, a to akýmkoľvek spôsobom.

„**Caring** (starostlivosť)“ je jadrom toho, čo môžeme ponúknuť pacientom, ich priateľom a rodine a ich zdravotníckemu tímu.

Všetko, čo robíme, robíme dôkladne. Od aktívneho počúvania, čo pacienti potrebujú, až po hlbšie premýšľanie o tom, čo by zlepšilo ich život.

Každá inovácia, ktorú robíme, má pomôcť starať sa o ľudí ešte lepšie ako doteraz. Každý program podpory pacienta alebo vzdelávací materiál poskytujeme preto, lebo nám na ľuďoch záleží.

Prijatím tohto sľubu pokračujeme aj naďalej v poskytovaní vynikajúcich služieb a tých najlepších produktov vo svojej triede, na ktoré sa spoliehate.

Špecialistky
zákazníckeho centra Convatec
v Nitre



Simona
Mikulášiková

Andrea
Krnáčová

Simona
Stanková

Dôkazom toho je aj to, že sme rozšírili naše zákaznícke centrum o ďalšiu kolegyňu. Teraz vám budú k dispozícii 3 špecialistky v zákazníckom centre, na ktoré sa môžete obrátiť telefonicky alebo aj osobne.



zákaznícka linka

convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Chceme k vám byť bližšie | Zastavte sa u nás osobne

Sme tu pre vás každý pracovný deň
od 8.00 - 16.30 hod.

Zákaznícke centrum Convatec
Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931
alebo nám napíšte email na
stomalinka@convatec.com
www.convatec.sk



SLOVILCO - Slovenské združenie stomikov Slovak Ostomy Association



„Urobme všetko preto, aby každý STOMIK na SLOVENSKU dostal to, čo mu patrí.“ MUDr. J. Lúčan, PhD.

Peter Baláži., prezident SLOVILCO

Som STOMIK - čo ma čaká?

Keď čítate tieto riadky, znamená to, že ste po operácii a zistili ste zmeny na svojom tele. Bola vám vyvedená stómia a pribudlo vám stomické vrecko. Je to zásadná zmena, ktorá zasiahla do vášho bežného života, a tak sú na mieste otázky, neistota a strach ako ďalej. Kladiete si množstvo otázok: „Ako budem teraz žiť? Ako mám stómiu ošetrovať a čo robiť so stomickým vreckom? Ako sa stravovať? Budem môcť viesť plnohodnotný život ako predtým?“

Nemajte obavy. V nemocnici vám všetko vysvetlí lekár a stomasestra. Dostanete pomôcky a brožúrky, kde nájdete komplexné poradenstvo, ako sa starať o stómiu. Po prepustení do domáceho prostredia si budete postupne hľadať nový spôsob života a vtedy je najcennejšia rada od toho, kto už stómiu má - od stomika. Kde ho stretnete? No predsa v ILCO klube. A čo to vlastne ten klub je?

Na Slovensku už od roku 1991 existuje SLOVILCO - Slovenské združenie stomikov, ktorého hlavným poslaním je pomáhať stomikom. SLOVILCO združuje osemnásť ILCO klubov po celom Slovensku.

Čo v kluboch robíme a ako si navzájom pomáhame?

- Členovia klubov sa pravidelne stretávajú; vymieňajú si rady a skúsenosti v oblasti ošetrovania stómie.
- Predsedovia informujú svojich členov o tom, na čo má stomik nárok.
- Organizujeme kultúrne, športové, spoločenské akcie, odborné prednášky o ošetrovaní stómie ako aj o používaní stomických pomôcok za účasti zástupcov všetkých spoločností, ktoré ich distribuujú.
- Organizujeme prednášky a školenia z oblasti sociálnej, právnej a zdravotnej starostlivosti.
- Pripravujeme a organizujeme rekondičné pobyty v kúpeľných a rekreačných zariadeniach na Slovensku, ktoré sú zamerané na zdravotnú a sociálnu rehabilitáciu.
- Robíme dobrovoľnú poradenskú činnosť pred a po operácii pre každého, kto nás osloví prostredníctvom stomasestry alebo ILCO klubu.

Prečo sa stať členom ILCO klubu?

- Dostanete informácie z prvej ruky. Rady od samotného stomika, ktorý prešiel tým, čím práve prechádzate vy, sú na nezaplatenie.
- Môžete využívať rekondično-rehabilitačné pobyty spolu s rodinnými príslušníkmi (ak sa stanú dobrovoľnými členmi ILCO klubu), ktoré organizuje SLOVILCO.
- Môžete sa zúčastňovať na medzinárodných stretnutiach stomikov.
- Čím väčšia je členská základňa, tým dôveryhodnejším partnerom sme pre štátne inštitúcie. To znamená, že sa nám lepšie darí presadzovať práva stomikov na skvalitňovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
- Podieľame sa na skvalitňovaní stomických pomôcok, na ich vývoji a výrobe, vyjadrujeme sa k ich kvalite.

Najdôležitejšou úlohou združenia SLOVILCO i samotných klubov je pomáhať stomikom a neustále sa snažiť zachovať limity a preplácanie všetkých kompenzačných pomôcok na ošetrovanie stómie zdravotnými poisťovňami na súčasnej úrovni. Len silné, jednotné a veľké združenie môže chrániť práva stomikov.

**Pridaj sa k nám a pomáhajme si navzájom.
Nikto iný za nás bojovať nebude.**

Treba si uvedomiť, že vyvedením stómie sa život nekončí, ale že sme naň dostali ďalšiu šancu. Preto neváhaj a prihlás sa do klubu čo najskôr.

ILCO kluby SLOVILCO

ILCO klub Banská Bystrica	ILCO klub Bratislava
Mgr. Nadežda Bieliková Mobil: +421 908 506 584 E-mail: nkollarova@gmail.com	Ing. Alena Blažejová Mobil: +421 907 093 746 E-mail: alena.blazejova@gmail.com
ILCO klub Galanta	ILCO klub Ilava
Milan Feješ Mobil: +421 949 713 859 E-mail: milanfejes@centrum.sk	Anton Uríček Mobil: +421 905 862 440 E-mail: tourko2@gmail.com
ILCO klub Košice	ILCO klub Levice
Rudolf Martinek Mobil: +421 905 272 329 E-mail: martinekrudolf@gmail.com	Ľubomír Polák Mobil: +421 907 345 198 E-mail: polak.levica@gmail.com
ILCO klub Martin	ILCO klub Michalovce
Štefan Staňo Mobil: +421 905 477 638 E-mail: stano@elektro.sk	Marianna Sobčáková Mobil: +421 907 533 549 E-mail: mariannasobcakova@gmail.com
ILCO klub Nové Zámky	ILCO klub Prievidza
Eva Zuberová Mobil: +421 908 728 264 E-mail: zuberova.eva@gmail.com	Ing. Emil Očenáš Mobil: +421 903 725 302 E-mail: ilcoprievidza@gmail.com
ILCO klub Prešov	ILCO klub Považská Bystrica
Alžbeta Jenčová Mobil: +421 949 818 286 E-mail: alzbeta.jencova@centrum.sk	Ing. Mária Pecinová Mobil: +421 903 561 118 E-mail: pecinova@post.sk
ILCO klub Smižany	ILCO klub Trenčín
Michal Bobko Mobil: +421 907 478 643 E-mail: pribina39@gmail.com	Ján Vašíček Mobil: +421 902 301 065 E-mail: jvasicek49@gmail.com
ILCO klub Topoľčany	ILCO klub Žilina
Anna Trenčanská Mobil: +421 908 785 771 E-mail: annatrencanska123@gmail.com	Peter Baláži Mobil: +421 904 390 499 E-mail: peterbalazi77@gmail.com
ILCO klub Trnava	
Alena Mikulíková Mobil: +421 918 813 930 E-mail: alenamimisk@gmail.com	

Convatec vzdeláva budúcu generáciu sestier

Neustále vzdelávanie je pre každého z nás veľmi užitočné. O to viac oceňujeme, keď nie je vnímané len ako povinnosť, ale ide o skutočný záujem.

Mgr. Anežka Smyková, Executive Sales Representative OC, Convatec



Anežka Smyková, Convatec

Začalo to celkom obyčajne. Oslovila ma pani Mgr. Alena Petrusová, učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, či by som do školy neprišla urobiť prezentáciu o nových trendoch v starostlivosti o stómiu. A keďže problematika stómii nie je úplne bežná, dohodli sme sa, že o nej poviem viac. Žiakom aj pedagógom. Vybrali sme termín 22. 2. 2023.

Dopoludnie bolo vyhradené žiakom, popoludnie pedagógom a diaľkovým študentom. V úvodnej, teoretickej časti som predstavila problematiku stómii ako celok, potom nasledoval stručný prehľad pomôcok na ich ošetrovanie. Zamerala som sa najmä na nové technológie a produktové rady.

Najviac zaujala Tvarovateľná technológia™, a to v rámci jednodielneho systému Esteem™+ aj dvojdielneho stomického systému Natura™ a Natura™+. Pomôcky tejto skupiny bývajú prvou voľbou všetkých stomikov so stómiou nad úrovňou kože. Veľmi jednoduchá manipulácia s pomôckou nevyžaduje nožnice, šablóny, primeriavanie a zároveň predchádza vzniku kožných komplikácií.

Potom som predstavila systém Esteem™+ Flex Convex a Soft Convex. Tieto pomôcky sú vhodné pri vpad-

nutých stómiách alebo pri stómiách v úrovni brušnej steny, či v kožnej riase.

Keďže pri každej výmene vrečka je veľmi dôležité, a nevyhnutné, používať príslušenstvo na starostlivosť o kožu, priblížila som nové produkty ESENTA™ - odstraňovač náplastí a ochranný film a tiež ďalšie produkty v rámci príslušenstva. Tu najviac zaujal produkt Diamonds™ s ActiveOne™ gélové a dezodoračné vankúšiky, ktoré sú veľmi obľúbené najmä u ileostomikov.



Počas interaktívnej časti môjho vystúpenia som pre názornosť použila „umelé brucho“, na ktorom si mohli

všetci, žiaci aj pedagógovia, vyskúšať aplikáciu pomôcky aj prakticky. Záujem o praktickú skúsenosť pre-

javili obe skupiny zúčastnených, čo svedčí o tom, že budúci zdravotníci, aj tí, čo ich na toto povolanie pripravujú, chcú svojim pacientom ponúknuť čo najlepšiu a najkvalitnejšiu starostlivosť.

Čo dodať na záver? Asi najlepšie to vystihujú slová Mgr. Aleny Petrusovej:

„Seminár s názornou ukážkou bol veľkým prínosom pre žiakov aj pre odborných učiteľov. Nové trendy v oblasti ošetrovania stómii nám pomôžu pri ďalšej výučbe, či už v teoretickej, ale hlavne praktickej.“

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
A ĎAKUJEME.



Fotografie sú použité so súhlasom autora a zúčastnených osôb.

Zdravá pokožka v okolí stómie je u nás na prvom mieste

- Adhezívna hmota na našich stomických pomôckach je našim dedičstvom
- Zdravie pokožky v okolí stómie je pre nás v starostlivosti o stómiu veľmi dôležité
- To, že sa zameriavame hlavne na adhezívnu hmotu, nám poskytuje príležitosť pozitívne ovplyvniť celé naše produktové portfólio
- V súčasnosti obraciame našu pozornosť práve na našu adhezívnu hmotu

Hydrokoloidné adhezívne hmoty pomáhajú udržiavať peristomálnu kožu zdravú.

Ako fungujú hydrokoloidné adhezívne hmoty?

- Hydrokoloidné adhezíva sú navrhnuté tak, aby vytvorili bezpečné spojenie a zároveň chránili pokožku.
- Technológia hydrokoloidného adhezíva, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Convatec pred viac ako 40 rokmi, bola všeobecne prijatá ako štandard starostlivosti o stómiu.

- Vo viacerých medzinárodných štúdiách zdravotníci uvádzajú, že zdravie peristomálnej pokožky je to najdôležitejšie, o čo sa zaujímajú.^{2,3}
- 65 % zdravotníkov v USA dokonca hovorí, že adhezívna hmota rozhoduje pri výbere stomického systému, ktorý odporučia.²

Aké sú 2 dôležité správy od nás pre vás?

1. Dôverujte adhezívnej hmote od spoločnosti Convatec.
2. Adhezívne hmoty od spoločnosti Convatec poskytujú veľa možností, ktoré pomôžu vybrať ten správny produkt pre každého človeka so stómiou.


„Až 75 % stomikov hlási kožné komplikácie“¹



Referencie:

1. Lessons Learned About Peristomal Skin Complications: Secondary Analysis of the ADVOCATE Trial. Salvadalena, Ginger; Colwell, Janice C.; Skountrianos, George; Pittman, Joyce.
 2. Please rank, in descending order, the importance of the following adhesive attributes. Q11 - Which item below most heavily influences your decision when choosing an ostomy product? IQVIA | ConvaTec | Global Adhesives survey | Country report | September 2021 (COMPASS: RM-61460) 3. OQ10. Below is a list of different attributes which could contribute to satisfaction in use of ostomy brands. Please rate each aspect on how important it is to you personally using a scale from 1 to 5, with 5 being "extremely important" and 1 being "not at all important." Base: Aware of brand. Global Nurses: Esteem+ (n=237). Natura (n=216). Natura+ (n=182). Sensura (n=227). Sensura Mio (n=217). (COMPASS: RM-61460) (COMPASS RM-61459)

Radikálne zmeňte svoju rutinu

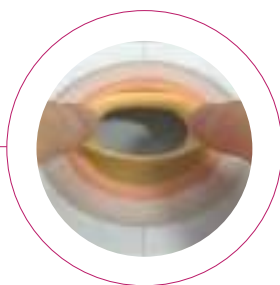


Krok 1:

Pomocou palcov zhrňte okraje otvoru dozadu a potom opatrne umiestnite podložku na stómiu.



Krok 2:

Tvarovateľný materiál sa zľahka vráti do pôvodného stavu a tesne obopne stómiu.

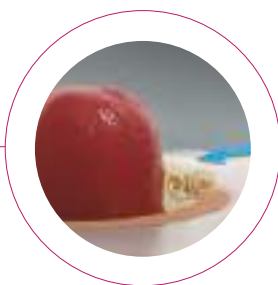

Krok 3:

Tvarovateľný spájací materiál sa mierne roztahuje a sťahuje spolu so stómiou, aby sa tak počas dňa prispôbil zmenám jej veľkosti.



Krok 4:

Vrstva podložky je schopná absorbovať vlhkosť, čo spôsobí jej mierne zdurenie okolo stómie, ktoré zabezpečí, že k nej pevne prilne. Vytvorí sa tak „korytnačí“ golier, ktorý poskytuje ešte efektívnejšiu ochranu pred presiaknutím.

Vedeli ste?

Podložky s Convatec tvarovateľnou technológiou™ sú navrhnuté tak, aby ich otvor tesne obopol stómiu, aby lepšie a bezpečnejšie sedeli.

95 % ľudí, ktorí začali používať Convatec tvarovateľnú technológiu™ hneď po operácii, si zachovalo zdravú peristomálnu pokožku².

Convatec tvarovateľná technológia™ je dostupná v našich adhezívach Stomahesive® a Durahesive®.

Vyberte ten správny produkt pre stómiu

Každá stómia je jedinečná!

My v spoločnosti Convatec chápeme, že každý stomik je jedinečný. To je dôvod, prečo sme vytvorili adhezívne hmoty tak, aby vyhovovali každému veku, typu tela, umiestneniu alebo tvaru stómie. Takže stomici vždy získajú zdravé puto, ktorému môžu dôverovať.

- Dôverujte bohatej histórii spoločnosti Convatec v technológii hydrokoloidných adhezívnych hmôt.

- Spoločnosť Convatec je zlatým štandardom v oblasti hydrokoloidov.
- Náš vynález technológie hydrokoloidného adhezíva spôsobil revolúciu v štandardoch starostlivosti o stómiu.
- Adhezíva Convatec vytvárajú zdravé putá tým, že chránia peristomálnu pokožku.

Aby sme vyhoveli jedinečným potrebám každého stomika, ponúkame rôzne stomické systémy. Bez ohľadu na obavy. So 40-ročnými skúsenosťami môžete spoločnosti Convatec dôverovať, že vie, čo stomici potrebujú.

Chápeme, čo vytvára zdravé putá. Poskytujeme nástroje potrebné na prevenciu a liečbu problémov u stomikov.

Vieme, že nie je každá stómia rovnaká. Vieme tiež, že vaša stómia a vaše telo sa môžu zmeniť.

Adhezívne hmoty Convatec sa dodávajú v troch typoch:

1. Stomahesive®
2. Durahesive®
3. Esteem™ + Flex Convex

Hmota Stomahesive® na štandardnú dobu nosenia



Stomahesive®

Pre ľudí, ktorých stolica je tuhá, odporúčame podložku Stomahesive, ktorá je určená na štandardnú dobu nosenia:

- poskytuje spoľahlivú ochranu pokožky;
- priľne na suchú aj na vlhkú pokožku;
- je príjemná na pokožke a je šetrná ku koži pri odstraňovaní.

Jednodielný systém

Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Modifikovaná Stomahesive® technológia	plochá	tvarovateľný vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja	Esteem™+ jednodielný systém
Stomahesive® technológia			výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Esteem™ jednodielný systém

Pre tuhú stolicu

- poskytuje spoľahlivú ochranu pokožky
- priľne na suchú aj na vlhkú pokožku
- je šetrná ku koži pri jej odstraňovaní

Dvojdielný systém

Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Stomahesive® technológia	plochá	tvarovateľný vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja Natura™ podložka s harmonikovým krúžkom výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Natura™ podložky dvojdielný systém



Hmota Durahesive® na dlhšiu dobu nosenia



Durahesive®

Pre ľudí, ktorých stolica je väčšinou tekutá alebo ak ide o moč, odporúčame podložku Durahesive s predĺženou dobou nosenia.

Je navrhnutá tak, aby:

- bola vysoko trvanlivá a odolná voči tekutej stolici
- mala zvýšenú adhezivitu
- jemne napučala pri kontakte s tekutinou pre lepšie utesnenie bez poškodenia pokožky

Jednodielny systém				
Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Durahesive® technológia a Durahesive® + technológia	plochá konvexná	vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Esteem™ + jednodielny systém

Dvojdielny systém				
Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Durahesive® technológia	plochá konvexná	tvarovateľný vystrihovateľný predstrihnutý	s/bez flexibilného okraja Natura™ podložka s harmonikovým krúžkom výpustné, uzavreté a urostomické vrecká	Natura® podložka s tvarovateľným otvorom

Väčšinou pre tekutú stolicu alebo moč

- vysoko odolná voči tekutému obsahu zo stómie
- silnejšie adhezívum
- pri kontakte s tekutinou mierne napučí, aby sa zlepšilo utesnenie bez poškodenia pokožky



Hmota na produkte Esteem™ + Flex Convex na zníženie podtekania



Esteem™ + Flex Convex

Pre ľudí, ktorých stolica je tuhá alebo väčšinou tekutá, alebo pre moč.

Pre tých, ktorí potrebujú všetko v jednom - podložku a vrečko ako celok.

Zvýšená flexibilita podložky umožňuje flexibilnejšie prispôsobenie sa kontúram tela pri pohybe, a tým sa zvyšuje komfort pri jej nosení.

- Prispôsobí sa telu a zlepšuje utesnenie, aby sa minimalizovalo podtekanie.
- Má vysokú počiatočnú lepivosť, ktorá pomáha priľnúť k pokožke.
- Poskytuje pocit väčšieho pohodlia pri nosení.

Jednodielný systém

Technológia	Podložka	Otvor pre stómiu	Možnosti	Dostupnosť
Esteem™ + Flex convex technológia	konvexná	vystrihovateľný predstrihnutý	s a bez flexibilného okraja výpustné, uzavreté a urostomické vrečka	Esteem™ + jednodielný systém

Pre tuhú aj tekutú stolicu a moč

- zlepšuje utesnenie s minimalizáciou podtekania
- vysoká počiatočná lepivosť pomáha priľnúť k pokožke
- zvýšená flexibilita umožňuje lepšie sa prispôbiť pohybom tela

„Zdravé puto je to, ktorému dôverujete“

Pamätajte si:

- Adhezívne hmoty spoločnosti Convatec sú založené na dôvere.
- Dôverujte spoločnosti Convatec, že sa vám podarí hneď na prvýkrát vybrať ten správny stomický systém.
- Verte, že stomici budú mať vďaka našim stomickým produktom pocit istoty a bezpečia a budú chránení.
- Dôverujte produktu z hľadiska prispôsobenia, veľkosti a ochrany proti podtekaniu.
- Pretože dôvera je to, čo získate od inovátora v oblasti hydrokoloidov a inovátora v starostlivosti o stómiu už viac ako 40 rokov.
- Dôvera je to, čo vytvára zdravé putá medzi stomikmi, zdravotníkmi a stomickými produktmi.



Podtekanie a koža v okolí stómie

Prečo a ako k nemu dochádza
a ako zabrániť podtekaniu
pod pomôcku

Objasnenie problému

Keď máte vyvedenú stómiu, môže sa občas pritrafiť nehoda v podobe podtekania či presakovania moču alebo stolice. Podtečenie znamená, že sa obsah stomického vrečka dostane do kontaktu s kožou v okolí stómie, čiže peristomálnou kožou. K podtekaniu môže dochádzať nielen vtedy, keď jeho následky vidíte na koži, oblečení či posteľnej bielizni. Spočiatku o ňom nemusíte ani vedieť, ak vytečený obsah zostane na koži pod podložkou stomickej pomôcky.

Podtekanie môže kožu poškodiť, spôsobiť bolesť a zápal. Preto je dôležité vedieť, ako podtekaniu predchádzať a čo robiť, keď k nemu dôjde.



Prečo dochádza k podtekaniu

Pri akomkoľvek type stómie a pri používaní akejkoľvek stomickej pomôcky môže dôjsť k podtekaniu.

Možné príčiny:

Nevhodná podložka

Každá podložka by mala tesne prilnúť k stómii. Ak používate strihateľné podložky alebo podložky s tvarovateľnou technológiou, meriate si stómiu pravidelne? A meriate si ju správne? Stómia môže zmeniť veľkosť alebo tvar, najmä v prvých týždňoch po jej vyvedení. Ak ste schudli alebo pribrali, mohlo to zmeniť veľkosť aj tvar stómie a tiež kožu okolo stómie.

Mali by ste sa tiež uistiť, že používate správne pomôcky pre váš typ stómie. Napríklad pomôcky s tvarovateľnou technológiou™ sú najvhodnejšie pre ľudí so stómiou nad úrovňou kože (vyčnievajúcou), zatiaľ čo konvexné pomôcky sú ideálne pre stómiu v úrovni alebo pod úrovňou kože (vpadnutou).

Nosíte vrecko príliš dlho

To môže viesť k prílišnému naplneniu stomickeho



vrecka, ktoré je ťažké a môže tak spôsobiť oslabenie príľnutia podložky ku koži. Vzniknutá netesnosť umožní podtekánie pod podložku.

Umiestnenie podložky na poškodenú - červenú a/alebo bolestivú - kožu

To môže zabrániť tomu, aby podložka správne prilnula ku koži, čo umožní, aby sa obsah vytekajúci zo stómie dostal do kontaktu s kožou a spôsobil ďalšie podráždenie.

Aký typ stómie máte?

Tak ako je iný každý človek so stómiou, aj každá stómia je iná

U

Urostómia

Ľudia s urostómiou musia venovať osobitnú pozornosť tomu, aby pred aplikáciou podložky bola peristomálna koža suchá. Moč vyteká nepretržite a akákoľvek vlhkosť pod podložkou môže zabrániť jej správne príľnutiu k pokožke a umožniť tak podtečenie.

Odporúčame meniť vrečko v priebehu dňa vtedy, keď je únik moču slabší. Pre väčšinu ľudí je to prvá vec po prebudení, keďže spotreba tekutín v noci je malá alebo žiadna.

Možno si všimnete drobné kryštáliky na peristomálnej koži. Biela a drsná pokožka súvisí s alkalickým močom a môže brániť dobrej príľnavosti podložky a spôsobiť netesnosti. Pitie dostatočného množstva tekutín môže spôsobiť, že moč bude kyslejší, čo môže zastaviť tvorbu drobných kryštálikov. Porozprávajte sa so sestrou o najlepších spôsoboch, ako udržať zdravé pH moču.



I

Ileostómia

Pri ileostómii vám odstránili časť tenkého čreva (ileum) a vytvorili na bruchu stómiu. Obsah vytekajúci zo stómie má tekutú alebo mierne kašovitú konzistenciu. Je to preto, že jedlo, ktoré konzumujete, neprechádza pred vylúčením z tela hrubým črevom, v ktorom sa z čiastočne strávenej potravy absorbuje voda. Odporúča sa preto vymieňať stomickú podložku ráno hneď po prebudení.

K

Kolostómia

Pri kolostómii zostáva väčšia časť hrubého čreva nedotknutá. Hrubé črevo je miesto, kde sa zo strávenej potravy absorbuje voda, preto je obsah hrubého čreva zvyčajne hustejší. Takýto obsah je pre kožu v okolí stómie krátkodobo menej dráždivý.

Aby vaše telo bolo dostatočne hydratované, odporúča sa vypiť až dva litre tekutín denne. Dôležitá je tiež zdravá a vyvážená strava s vysokým obsahom vlákniny, ako je ryža, chlieb, cestoviny a zemiaky.



Ako môže podtekanie poškodiť pokožku

Koža je najväčší orgán tela a vytvára bariéru proti vonkajším poškodeniam. Ak chcete mať pokožku zdravú, musíte sa o ňu starať - hydratovať ju, udržiavať čistú a chrániť pred slnečným UV žiarením.

Keď máte vyvedenú stómiu, je veľmi dôležité starať sa o peristomálnu kožu, ktorá môže bolieť a zapáliť sa, ak sa dostane do kontaktu s podtekajúcim či presakujúcim obsahom zo stomického vrečka. Moč má totiž iné pH ako koža a stolica zasa obsahuje aktívne enzýmy, ktoré môžu pokožku oslabiť.

Peristomálnu kožu si môžete poškodiť aj vtedy, ak podložku stomického vrečka odstránite príliš rýchlo. „Odlupovanie“ kože môže porušiť príľnavosť podložky a spôsobiť netesnosti.

Pomerne často sa stáva, že ľudia, ktorých trápi podtekanie, o tom nechcú hovoriť. Čakajú niekoľko dní, týždňov alebo dokonca mesiacov, kým vyhľadajú pomoc. Niektorí majú dokonca pocit, že je to niečo, s čím sa musia zmieriť.

Peristomálna pokožka by sa nemala líšiť od zdravej kože na zvyšku vášho tela. Ak sčervená, je podráždená alebo bolestivá, mali by ste požiadať o radu sestru.

S podtekaním sa nemusíte zmieriť

Peristomálna koža by sa nemala líšiť od kože na zvyšku tela. A hoci sa môže objaviť podtekanie a bolesť kože, nie je to niečo, s čím by ste sa mali pri stómii zmieriť.

Príznaky, že pokožka v okolí stómie je poškodená:

- svrbenie alebo bolesť pod podložkou;
- pokožka je vlhká alebo teplá, alebo vyzerá ako vlhká;
- koža má ružovú alebo červenú farbu;
- sú na nej plúzgiere alebo pot;
- po odstránení podložky sa v krátkom čase neobnoví jej normálny stav.

Nemusíte sa cítiť trápne a nechať podtekanie poškodiť vašu kožu alebo vašu sebaistotu. Hneď ako sa u vás objavia obavy z presakovania alebo podráždenej peristomálnej kože, spojte sa so sestrou. Pomôže vám nájsť riešenie týchto častých, ale väčšinou liečiteľných a riešiteľných problémov.



Ako chrániť pokožku a zastaviť podtekание

Podtekание či presakovanie je veľmi časté v prvých dňoch po operácii s vyvedením stómie, a preto je žiaduce, aby ste sa o akýchkoľvek obavách súvisiacich so stómiou porozprávali so sestrou.

Bez ohľadu na to, či máte stómiu vyvedenú krátko alebo už dlhšie, vždy existujú účinné kroky, ako minimalizovať riziko podtekания pod pomôcku.

Podložka by mala tesne priľnúť na kožu a obopínať stómiu. V prvých týždňoch po operácii môže stómia zmeniť tvar a veľkosť. Pravidelné meranie stómie vám umožní vystrihnúť alebo vytvarovať v podložke správny otvor. Elastický okraj podložky by mal obopínať stómiu do výšky 2 - 3 mm tak, aby nebolo vidno pokožku.

Pomáha aj pravidelná výmena stomických vreciek a kontrola pokožky pred priložením podložky. A ak máte na bruchu chĺpky, udržiavajte ich čo najkratšie pomocou elektrických strojčekov, vyhnete sa tak bolestivému ťahaniu chĺpkov pri odstraňovaní podložky.

Skúsili ste...

Podložky s **tvarovateľnou technológiou™** vytvárajú elastický tesniaci golier s tvarovou pamäťou, ktorý sa dokáže prispôbiť akejkoľvek veľkosti a tvaru stómie. Tvarovateľnú technológiu™ nájdete v jednodielnom aj v dvojdielnom systéme.



Vyskúšajte bezplatnú vzorku s tvarovateľnou technológiou™,
naskenujte QR kód

Vyskúšajte produkty navrhnuté tak, aby znížili riziko podtekania a udržali zdravú peristomálnu kožu

Skúsili ste...

Jednodielny konvexný stomický systém Flex alebo Soft convex. Adhezívna hmota podložky je flexibilná (Flex) alebo mäkká (Soft) a pri oboch typoch je konvexná. Vrecká sú určené na stómiu v úrovni alebo pod úrovňou pokožky, na nerovnosti v okolí stómie, na ochabnuté brušné svalstvo. K dispozícii sú uzavreté, výpustné a urostomické vrecká.



stomický konvexný systém s tvarovateľnou technológiou



Konvexné riešenie sa prispôbuje obrysom tela.



Vyskúšajte bezplatné vzorky produktov SOFT (jemný) konvexný systém Convex,
naskenujte QR kód



Vyskúšajte bezplatné vzorky produktov FLEX (flexibilný) konvexný systém,
naskenujte QR kód



Život bez podtekania je možný

Je dôležité pochopiť, že podtekanie sa občas môže objaviť, ale nemalo by byť časté. Nie je to nič, za čo by ste sa mali cítiť trápne. Existujú však kroky, ktoré môžete urobiť na minimalizovanie rizika podtekania a zlepšenia starostlivosti o peristomálnu kožu.

Skúsili ste...

Ochranný film ESENTA™ vytvára na pokožke priedušnú bariéru, ktorá chráni kožu pred škodlivými účinkami presakovania a adhezíva až 72 hodín.

Odstraňovač náplastí ESENTA™ rýchlo a ľahko odstraňuje zvyšky adhezíva, čím zabraňuje odlupovaniu a poškodeniu kože.



Vyskúšajte bezplatné vzorky produktov ESENTA™,
naskenujte QR kód



Nedovoľte, aby
vám podtekanie
alebo strach
z neho zabránili žiť
plnohodnotný život



Skúsili ste...

Varimate™ adhezívne pásky zafixujú stomickú pomôcku a prispôbia sa tvarom vášho tela.

Stomahesive® pasta 60 gr ochranná pasta je vhodná ako výplň telesných nerovností, aby sa predĺžila použiteľnosť stomickej pomôcky, a chráni pokožku pri podtekaní.

Stomahesive® Seals tesniace krúžky sú tvarovateľné, absorbujú vlhkosť a chránia peristomálnu kožu pred agresívnym črevným obsahom. Môžu byť kombinované s pastou Stomahesive®.



Vyskúšajte bezplatnú
vzorku produktu
Stomahesive®
ochranná pasta,
naskenujte QR kód

Varimate



Vyskúšajte
bezplatnú vzorku produktu
Varimate™ adhezívne pásky,
naskenujte QR kód



Vyskúšajte bezplatnú
vzorku produktu
Stomahesive®
tesniace krúžky,
naskenujte QR kód



Rady, ako predísť podtekaniu



SPRÁVNE

- ✓ Odstraňujte podložku pomaly a opatrne - jednou rukou pridržajte a mierne natáhuajte pokožku a druhou rukou jemne odliepajte podložku.
- ✓ Opatrne umyte peristomálnu kožu obyčajnou teplou vodou alebo použite špeciálne prípravky na peristomálnu kožu.
- ✓ Pred priložením podložky sa jemným dotykom uistite, že je pokožka suchá.
- ✓ Pravidelne používajte holiaci strojček, niekoľkokrát do týždňa, aby chĺpky okolo stómie boli čo najkratšie.
- ✓ Vyskúšajte dvojdielny stomický systém, aby ste predišli príliš častej výmene podložky.
- ✓ Jedzte vyváženú, pestrú stravu a nezabúdajte na pitný režim.
- ✓ Pred spaním vyprázdňte vrecko alebo sa uistite, že nie je plné viac ako z jednej tretiny.
- ✓ Merajte si stómiu v pravidelných intervaloch - aspoň raz za mesiac - pretože môže zmeniť tvar a veľkosť.
- ✓ Uistite sa, že okraj bariéry vytvorenej elastickou časťou podložky je 2 - 3 mm pri kolostómii a ileostómii, alebo 1 mm pri urostómii.
- ✓ Vyskúšajte nové pomôcky a príslušenstvo, aby ste našli to najvhodnejšie pre vás.
- ✓ Pri akomkoľvek probléme ihneď navštívte alebo inak kontaktujte sestru a požiadajte o pomoc a radu.



NESPRÁVNE

- ✗ Nechať stomické vrecko na tele, keď je plné/tážké.
- ✗ Nevymeniť akýkoľvek produkt, ak vám spôsobuje poškodzovanie kože.
- ✗ Prikladať podložku na poškodenú pokožku.
- ✗ Používať akýkoľvek stomický produkt bez dôkladného prečítania priloženého návodu.
- ✗ Rýchlo odtrhnúť podložku z pokožky.
- ✗ Umývať kožu okolo stómie mydlom a gélom s obsahom olejov, parfumov alebo iných chemických látok, aké sa nachádzajú v bežných kozmetických výrobkoch.
- ✗ Používať na peristomálnu kožu akékoľvek krémy a masti.
- ✗ Odkladať kontakt so sestrou, ak sa objaví podtekание alebo vás koža štípe a bolí.

Vždy si pamätajte, že so stómiou nie ste sami. Vaša sestra je vám vždy nablízku, ak máte obavy z podtekania alebo akékoľvek iné, neváhajte ju kontaktovať.

Môžete sa tiež pridať do bezplatného podporného programu me+™, ktorý ponúka rady a tipy na životný štýl pre každého stomika a jeho opatrovateľa.



Ak sa chcete bezplatne prihlásiť do programu me+, naskenujte QR kód



- forever caring -

Revolučné a spoľahlivé medicínske riešenia na zlepšenie životov, o ktoré sa staráme



Claire Legeron

Sestra pre enterostomálnu terapiu

Tieto texty vznikli s podporou Claire Legeron, sestry z oblasti enterostomálnej terapie.

Claire vyštudovala ošetrovatelstvo v Paríži a absolvovala stáže v nemocnici La Timone v Marseille a niekoľkých nemocniciach v Bordeaux.

15 rokov pracovala na Chirurgickom oddelení Clinique de l'Atlantique v La Rochelle a posledných päť rokov sa stará o ľudí so stómiou. Ako členku Francúzskej asociácie enterostomických terapeutov (AFET) ju teší každé zlepšenie života jej pacientov.

Čomu čelia ľudia so stómiou?

Ľudia so stómiou majú často peristomálne kožné problémy.

PhDr. Beata Zabáková, PhD., Director, Marketing & Regulatory Ostomy, AWC&CCC Slovakia

Peristomálne kožné problémy sú u ľudí so stómiou pomerne časté. V skutočnosti sú najčastejšie sa vyskytujúcou fyzickou komplikáciou po operácii s vyvedením stómie, ktorú väčšinou spôsobuje podtekanie alebo zle priliehajúca podložka. Naučiť sa usmerňovať život so stómiou veľakrát znamená prispôbiť sa novým podmienkam, ale môže doň stomikom priniesť aj novú nádej. Ak sú však kožné problémy pretrvávajúcim problémom, môže to ovplyvniť kvalitu života stomika. Štúdie ukazujú, že osem z desiatich ľudí s vyvedenou stómiou má aj peristomálne kožné problémy¹ a až 76 % trápia komplikácie, ktoré trvajú až tri mesiace.² Pri niektorých menej závažných alebo stredne závažných komplikáciách stomici nemusia problémy s kožou v okolí stómie rozpoznať, a tak nevyhľadajú odbornú lekársku starostlivosť, až kým sa problémy nezhoršia.³

Základnou príčinou väčšiny kožných komplikácií je podtekanie - úniky zo stómie do jej okolia.

Podtekanie môže stomikom spôsobiť nepohodlie, bolesť a rozpaky.



stomický systém s tvarovateľnou technológiou

Do dnešného dňa neboli známe spôsoby riešenia problémov s podtekaním, ktoré by ich adekvátne vyriešili. Vystrihovateľné podložky sú náročné tak pre zdravotníckych

pracovníkov, ako aj pre stomikov, pretože každý človek má jedinečný typ tela a oblasť, kde má umiestnenú stómiu.

Spoločnosť Convatec ponúka riešenie opakujúceho sa cyklu podtekania a kožných problémov:

Convatec podložky s tvarovateľnou technológiou™.

Naše jedinečne tvarovateľné produkty nielen že prerušia cyklus podtekania a poškodenia kože, pretože lepšie prilnú na kožu, ale ich používanie je ľahšie a jednoduchšie. Ponúkajú tak ľuďom so stómiou istotu a dôveru žiť uspokojivý život.⁴

Referencie:

1. Fellows J, et al. Multinational survey on living with an ostomy: prevalence and impact of peristomal skin complications. Br J Nurs 2021; 30: S22-30. 2. Herlufsen P, et al. Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs 2006; 15: 854-62. 3. Voegeli D, et al. Factors influencing the incidence of peristomal skin complications: evidence from a multinational survey on living with a stoma. Gastrointestinal Nursing 2020; 18(suppl 4): S31-38. 4. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Maria Teresa Szewczyk, MD, PhD; Grazyna Majewska, RN, ETN; Mary V. Cabral, MS, FNP-BC, CWOCN- AP; and Karin Hölzel-Piontek, RN; The Effects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Condition in Persons with an Ostomy: Results of a Prospective, Observational, Multinational Study. Ostomy Wound Management 2014;60(12):16-26.



Novinky v roku 2024

Esteem[®] + Accuseal[™]

Má podložku s technológiou Durahesive[®] a antirefluxnú chlopňu proti spätnému toku moču. Je navrhnuté tak, aby bránilo úniku moču a udržiavalo pokožku v okolí stómie zdravú.

Jediné UROSTOMICKÉ vrecko, ktoré potrebujete

NOVINKA
2024



ŠETRNÉ KU KOŽI



PRIEHLADNÉ




JEDNODUCHO
SA VYPÚŠŤA



BEZPEČNÉ

Zabraňte podtekaniu a udržujte si zdravú kožu

Na rozdiel od iných podložiek, ktoré sa pri kontakte s tekutým obsahom môžu poškodiť, má podložka s technológiou Durahesive® lepšiu tesniacu schopnosť, a preto lepšie chráni stómiu aj kožu okolo nej.

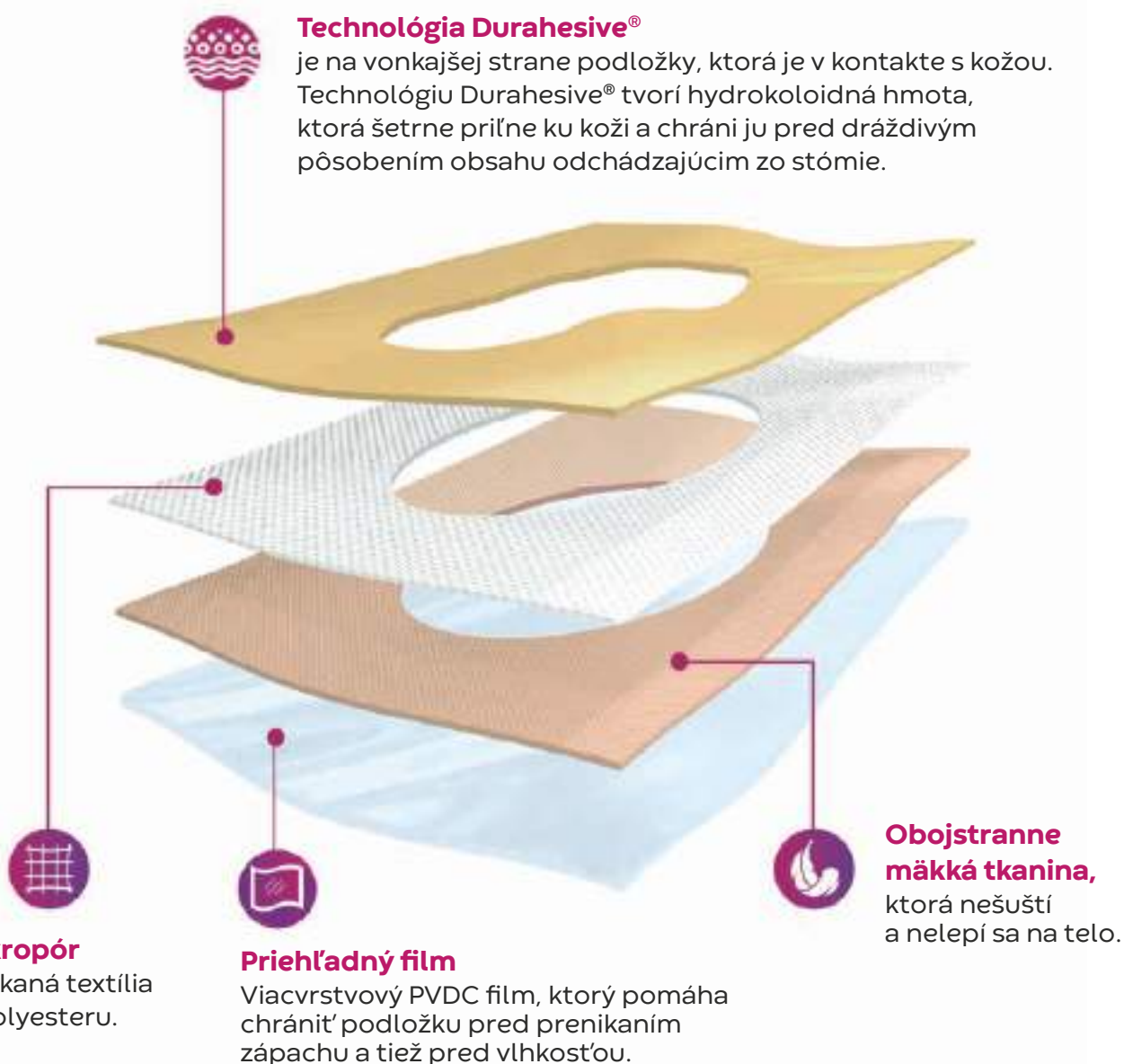

kód produktu	názov produktu	veľkosť podložky	ks v balení	ŠÚKL kód
421631	Vrecko urostomické jednodielne Esteem®+ Accuseal™	13 - 45 mm	10	F5970A

Dokonalá spoľahlivosť, istota a pohodlie

Úchytky na pridržný stomický opasok


Pre väčší pocit bezpečia a istoty má vrecko úchytky na pridržný stomický opasok.

Vystrihovateľné vrecko

Vrecko je možné prispôbiť veľkosti a tvaru stómie. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko podtekania.

Prijemné na dotyk

Materiál vrecka, ktorý sa dotýka kože, je mäkký a šetrný ku koži.

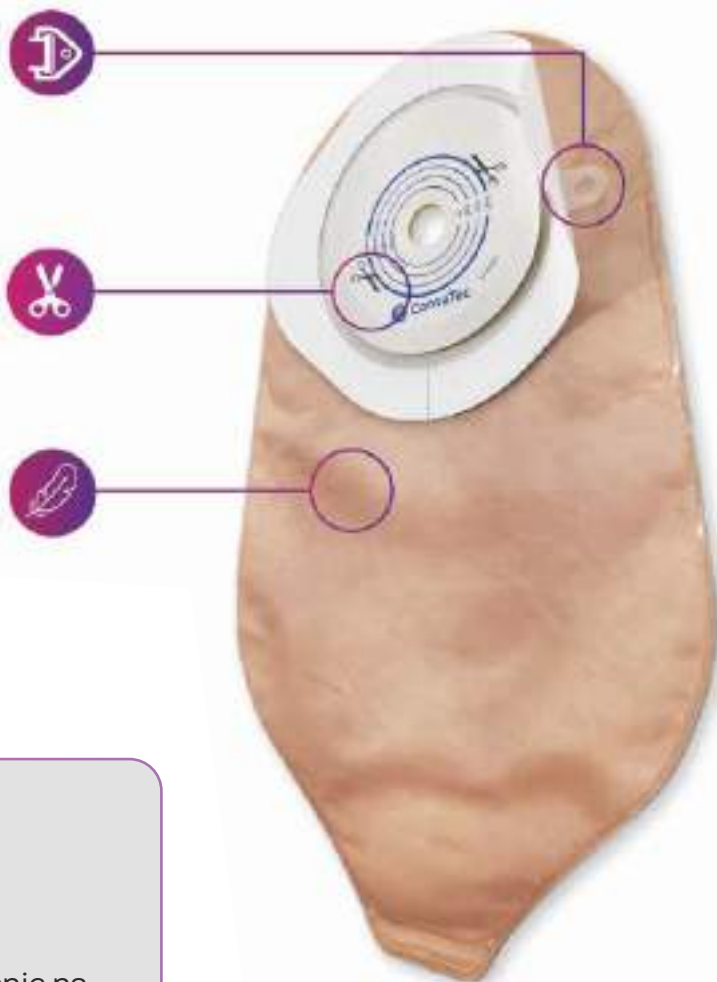

Jednoduché nočné vypúšťanie

Accuseal™ umožňuje ľahké pripojenie na nočné zberné vrecko, ktoré vám zabezpečí pokojný a bezstarostný spánok.




Bezpečnosť

Vrecko má flexibilné úchytky na pripevnenie pridržného stomického opasku pre ešte väčší pocit istoty a bezpečia.

Šetrný ku koži

Podložka Durahesive® chráni kožu pred podtekajúcim močom.

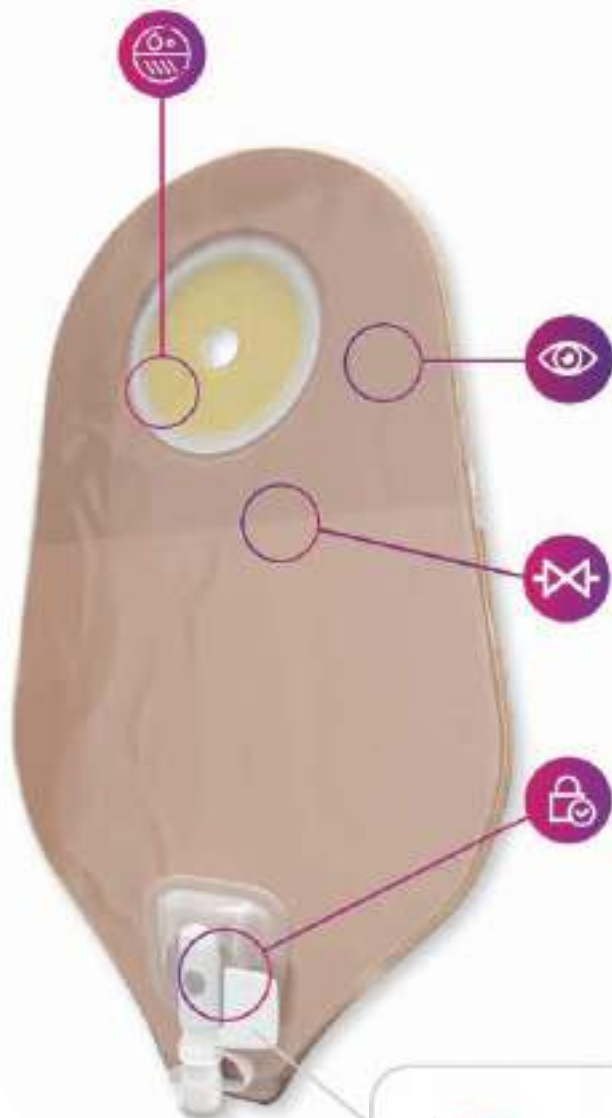

Priehľadné vrečko

Priehľadná fólia umožňuje presné umiestnenie vrečka okolo stómie, sledovanie jej stavu aj množstva moču.

Chlopňa proti spätnému toku moču

Zabraňuje, aby sa moč dostal späť k stómii a do jej okolia.

Ľahké otvorenie a uzatvorenie

Otočný uzáver a poistná zátka umožňuje jednoduché a pri tom bezpečné uzavretie.



Otočný ventil Accuseal™

Jednoduchá manipulácia: červená značka indikuje, že výpusť je otvorený.

Zdravé putá nás robia silnými

1



Príprava kože

Zlepšenie rutiny starostlivosti o stómiu začína 4 krokmi

2



Podpora stomického systému

3



Pridaná bezpečnosť

4



Odstránenie stomického systému



Správne príslušenstvo môže znamenať rozdiel

Či už hľadáte lepšiu ochranu pokožky alebo zvýšenú bezpečnosť vášho stomického systému, so správnou kombináciou príslušenstva sa môžete cítiť ešte pohodlnejšie a bezpečnejšie.

kód produktu	Názov	ks v balení/veľkosť	ŠÚKL kód
Odstraňovač náplastí (sting free) ESENTA™			
423281	ESENTA™ obrúsky	30	F91155
423289	ESENTA™ sprej	1 (50 ml)	F91154
Ochranný film (sting free) ESENTA™			
423282	ESENTA™ obrúsky	30	F91152
423288	ESENTA™ sprej	1 (50 ml)	F91153
Čistiaca pena StomFoam®			
	Stom Foam®	150 ml	F 3555A
Pasta Stomahesive®			
183910	Stomahesive® 60 g	1 (60 g)	F41229
129730	Stomahesive® 30 g	1 (30 g)	F41230
Tesniace krúžky Stomahesive® Seal			
413503	Stomahesive® Seal, 48 mm, hrúbka 4 mm	10	F92109
413504	Stomahesive® Seal, 48 mm, hrúbka 3 mm	10	F92108
Ochranný zásyp Stomahesive®			
25535	Stomahesive® 25g	1 (25 g)	F41228
Pásky adhezívne Varimate Thin			
422149	Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 22 cm	20	F2087A
422148	Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 11 cm	30	F2086A
Prídržný opasok			
175510		1	F41299
Gélujúce a dezodoračné vankúšiky Diamonds™ s ActiveOne			
420791	Diamonds™ s ActiveOne™	100	F91151
Sprej maxi StomOdor®			
1717273	StomOdor®	210 ml	F96248
Kvapky StomOdor®			
1717275	StomOdor®	35 ml	F96247

Názov adhezívnych pásov z Varimate Thin sa zmení na ESENTA™

NOVINKA

V roku 2024 budeme pokračovať v zmene názvov niektorých produktov. Naša nová značka ESENTA™ sa vám najbližšie predstaví v spojení s adhezívnymi páskami.

Rovnaká funkčnosť, účel určenia, jednoduchá aplikácia, vyrobené z hydrokoloidného materiálu, ktorý je šetrný ku koži a pre všetky typy stómie.

Toto všetko zostáva nezmenené.

Čo sa zmení?

Bude nový názov:

ESENTA™ hydrokoloidné adhezívne pásky.

A bude nový obal.

Budú súčasťou nášho produktového portfólia ESENTA™ v starostlivosti o kožu v okolí stómie. Hydrokoloidné



adhezívne pásky udržiavajú bezpečné a šetrné spojenie s pokožkou pre väčšinu ľudí so stómiou.

Vďaka bezpečnému spojeniu medzi vami a vašim stomickým vreckom môžete robiť veci, ktoré chcete, či už je to plávanie, cvičenie, rande alebo len návrat do práce.

Pre viac informácií nás kontaktujte na bezplatnom čísle zákazníckeho centra.

zákaznícka linka



convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

ŠÚKL Kód	Názov	Veľkosť	ICC Code	počet ks v balení
F 2087A	Pásky adhezívne Varimate Thin	hydrokoloidné, rovné, 5 x 22 cm	422149	20 ks

ŠÚKL Kód	Názov	Veľkosť	ICC Code	počet ks v balení
F 2086A	Pásky adhezívne Varimate Thin	hydrokoloidné, rovné, 5 x 11 cm	422148	30 ks

Dotazník pre čitateľov časopisu Radim

Zdieľajte svoje predstavy o vašom časopise Radim

Boli by sme radi, keby časopis Radim bol čo najviac prispôsobený vašim potrebám, a preto sme vytvorili krátky dotazník s cieľom lepšie pochopiť, čo by ste v časopise ocenili, prípadne privítali. Vaše odpovede nám pomôžu formovať obsah, ktorý vás skutočne zaujíma. Prosíme, nájdite si chvíľu na zodpovedanie nasledujúcich otázok.

Otázky:

1. Ktoré témy by ste v časopise radi videli častejšie alebo podrobnejšie spracované? (napr. nové produkty, technológie, skúsenosti stomikov, stravovanie, cvičenie)
.....
.....
2. Aké formáty obsahu vás najviac zaujímajú? (napr. rozhovory s odborníkmi, novinky v medicíne, vedecké štúdie, recepty a podobne)
.....
.....
3. Chceli by ste čítať príbehy iných stomikov a ich skúsenosti s každodenným životom so stómiou?
.....
.....
4. S akými konkrétnymi problémami alebo otázkami sa stretávate pri starostlivosti o stómiu, ktorým by sa časopis mal viac venovať?
.....
.....
5. Ako by ste opísali ideálny článok v časopise Radim? (napr. dĺžka, štýl, obsah atď.)
.....
.....

Túto stranu s vyplneným dotazníkom s vašimi myšlienkami a nápadmi vytrhnite a pošlite nám ho v priloženej odpovednej obálke.

Tešíme sa na vaše podnety, ktoré určite zakomponujeme do ďalšieho čísla, ktoré pre vás budeme pripravovať.

Ďakujeme za váš čas a podnet na zlepšenie časopisu Radim.

S úctou

Zákaznícke centrum Convatec



Príbehy stomikov

S me+™ spoločenstvom budete súčasťou skupiny ľudí, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a pomôžu vám prispôbiť sa životu so stómiou. Podelia sa s vami o vrcholy a pády a ako sa vyrovnali s touto zmenou vo svojom živote. Pomôžu vám vrátiť sa späť do života a vidieť možnosti.

Na našej webovej stránke www.convatec.sk nájdete inšpiratívne príbehy ľudí so stómiou, ktorí naďalej robia veci, ktoré milujú. A možno tam raz bude aj váš príbeh.



Zoznámte sa s Perrym

FAP - syndróm familiárnej adenomatóznej polypózy - je zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré sa zvyčajne prejaví do 40. roku života a neskôr vedie k rakovine hrubého čreva.

Zo skúseností svojho blízkeho okolia Perry Swisher vie, že tento syndróm môže postihnúť každú generáciu. Jeho stará mama zomrela vo veku 53 rokov a jeho matka ako 36-ročná - obe na rakovinu hrubého čreva. Strýkovi diagnostikovali FAP vo veľmi mladom veku a mal len 20 rokov, keď sa rozhodol pre operáciu s vyvedením ileostómie. Preto keď si Perry koncom roka 2013, ako 35-ročný, našiel v stolici krv, napadla mu tá najhoršia myšlienka.

Vyšetrenia ukázali, že Perry má v hrubom čreve množstvo polypov a lekári boli dosť skeptickí, dávali mu len pár rokov života. „Spomínam si, že myslou mi prebehla celá naša rodina, aj to, ako ju ovplyvnila rakovina hrubého čreva - a rozhodol som sa bojovať.“

Perry sa rozhodol pre ileostómiu, rovnako ako predtým jeho strýko. „To bol začiatok môjho nového života,“ hovorí. „Spočiatku to bolo veľmi bolestivé a nepríjemné, ale rodina ma podporovala. Strýko sa stal mojim

sprievodcom životom so stómiou. Sám má dve zamestnania, ale nikdy sa na nič nestážiže. Som mu vďačný za všetky rady a skúsenosti, ako žiť so stómiou. Je mojim hrdinom.“

Dnes Perry pracuje ako operátor ťažkých zariadení, so špecializáciou na zrovnávače používané pri stavbe ciest. Hovorí, že takáto fyzicky náročná práca so stómiou bola značná výzva, ale nie jediná a najdôležitejšia.

„Dovtedy som myslel len na fyzické obmedzenia, ktoré mi stómia spôsobuje a nevedomil som si, že veriť si, že môžem pokračovať v práci, ktorú som robil pred operáciou, je tá najväčšia výzva. Poznanie, že ľudia so stómiou môžu pracovať, chodiť do školy, starať sa o rodinu a robiť všetko to, čo ostatní ľudia, mi pomohlo pokračovať v živote. Som vďačný ľuďom, ktorí mi pomohli cítiť sa opäť normálne.“



Zoznámte sa s Dianou

Keď mi lekár povedal, že mám rakovinu hrubého čreva vo štvrtom štádiu, bolo to ťažké. Oveľa ťažšie však bolo prijať skutočnosť, že ešte v ten istý deň musím podstúpiť operáciu, pri ktorej mi vyvedú stómiu. Bolo to presne 22. apríla 2014. Už samotná diagnóza bola šok, a potom ešte prijať a zvyknúť si na stómiu - nebolo

to ľahké. Podstúpila som operáciu s vyvedením kolostómie. Predtým som síce už o stómii počula, ale viac som o tom nevedela. Navyše som po operácii musela absolvovať chemoterapiu, čo tiež nebolo jednoduché. No nevzdala som sa a celé som to prežila aj vďaka pomoci priateľov a mojich blízkych.

Až neskôr som pochopila, že akútna operácia s vyvedením stómie mi vlastne zachránila život. Všetko toto sa stalo pred niekoľkými rokmi. Za ten čas som sa vyliečila a stómiu som prijala ako súčasť svojho tela. Teraz si užívam dôchodok a žijem plnohodnotný život.

Robím všetko, čo chcem. Na vrecko som si zvykla a už ma v ničom neobmedzuje. Môžem si obliecť všetko, čo sa mi páči. Každý deň cvičím - chodím do posilňovne, cvičím aerobik. Bývam blízko hôr a dlhé prechádzky sú pre mňa bežné. Dokonca som bola aj na horských túrach.

Moja chuť žiť, mi dodáva odvahu, priviedla ma až sem a plánujem v tom ešte dlho pokračovať. Ak mám prežiť život so stómiou, tak nech je čo najbohatší. Nikto nechce skončiť s vreckom, no omnoho dôležitejšie je, že žijem.



Viac inšpiratívnych príbehov nájdete v našom blogu, naskenujte QR kód

Požiadajte o pravidelné zasielanie časopisu Radim, ktorý je určený každému, koho táto problematika zaujíma, ZADARMO vyplnením a zaslaním prihlášky na našu adresu uvedenú na zadnej strane časopisu.

Ak už časopis odoberáte, nie je potrebné nám TÚTO prihlášku posielat'.

PRIHLÁŠKA DO PROGRAMU



Zaregistrovaním sa do programu me+™ získate podporu, ktorú potrebujete a informácie o produktoch, životnom štýle a stravovaní priamo od špecialistov.



convatec
— forever caring —

VÁŽENÁ PANI, VÁŽENÝ PÁN,

vyplnením tohto formulára udeľujete súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom prihlásenia sa do programu me+™ a získate prístup k podpore, ktorá vám pomôže žiť život, aký chcete. Bližšie informácie o me+™ [www.me+ podpora | Convatec.sk](http://www.me+podpora|Convatec.sk). Po registrácii vám zavoláme, aby sme vás privítali v programe a vysvetlili vám podporu, ktorú máte k dispozícii.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje je spoločnosť Unomedical s.r.o., Priemyselný park 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36597384 ("Convatec"). Prečítajte si, naše zásady ochrany osobných údajov www.convatec.sk/o-nas/zasady-ochrany-osobnych-udajov/, kde nájdete podrobné informácie o tom, ako chránime a používame vaše osobné údaje; na požiadanie vám môžeme poskytnúť aj kópiu. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania vášho členstva.

* povinný údaj

Meno a priezvisko:*

Adresa, PSČ:*

Telefón:* E-mail: Dátum narodenia:

- Spoločnosti Convatec týmto udeľujem súhlas, aby ma kontaktovali prostredníctvom komerčných elektronických správ (e-mail¹, textové správy), klasickej pošty alebo telefonických hovorov za účelom sprostredkovania propagačných informácií (marketingových správ) o produktoch, službách, novinkách a akciách Convatec, zasielania časopisu, pohľadníc. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu 4 rokov od udelenia súhlasu.
- Spoločnosti Convatec týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním údajov o zdraví spojených so stómiou, za účelom bezplatného zasielania vzoriek produktov. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu 4 rokov od udelenia súhlasu.

Vyberte rozsah dátumov chirurgického zákroku:

- menej ako 3 mesiace 4 - 12 mesiacov viac ako 12 mesiacov som pred operáciou

Typ stómie: kolostómia ileostómia urostómia

Typ pomôcky: jednodielny systém dvojdielny systém

Názov pomôcky:

Miesto prepustenia:

Dátum: **Podpis:**

¹ Udelením súhlasu na tento účel prehlasujem, že som dovŕšil vek 16 rokov. V prípade záujemcov mladších ako 16 rokov, sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Pre udelenie súhlasu od zákonného zástupcu je nutné nás kontaktovať.

Som si vedomý/á, že udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu Convatec, Unomedical, s. r. o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, alebo e-mailom na adresu: stomalinka@convatec.com, prípadne na telefónnom čísle: 0800 800 111. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný/á podľa čl. 13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov, ktoré sú dostupné na: www.convatec.sk. V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte niekoľko práv. Napríklad, máte právo vidieť akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, právo na opravu týchto informácií (pokiaľ sú nesprávne alebo neúplné) alebo ich vymazanie, právo obmedziť alebo namietať proti spracovaniu a právo požiadať nás o zdieľanie vašich údajov s inou stranou. V prípade získania ďalších informácií môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre dohľad nad spracovaním osobných údajov: email: dpo2@proenergy.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Ak chcete podať sťažnosť o tom, ako spoločnosť Convatec spracúva vaše osobné údaje, máte právo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.



Program me+™ vám toho ponúka veľmi veľa

Každý, kto žije so stómiou, má právo užívať si každý deň naplno a žiť svoj život ako sa najlepšie dá.

Je veľa dôvodov prečo sa prihlásiť do programu me+™

me+™ je kompletný podporný program pre každého, kto žije so stómiou. Bezplatné prihlásenie, jeho mnohé výhody, medzi ktoré patria napríklad služby a odborné poradenstvo, vám pomôžu a prevedú vás každým krokom života so stómiou. Prezrite si podrobnejšie všetky služby, ktoré ponúkame, a potom sa ešte dnes zaregistrujte cez formulár na web stránke, alebo nám zavolajte na bezplatné číslo zákazníckeho centra, prípadne nám napíšte email.



Priame rozhovory s odborníkmi

Keď potrebujete radu, podporu a istotu, sme tu pre vás. Môžete sa zúčastniť prezenčných prednášok a stretnutí alebo zavolať našim špecialistkám v zákazníckom centre, ktoré sú ochotné vždy poradiť.



poradenstvo zdravotníckych pracovníkov



osobné stretnutia



bezplatná linka zákazníckeho centra

Ste vždy informovaní

Naše pravidelne zasielané emaily vám dajú veľa tipov a rád týkajúcich sa životného štýlu, budete vedieť o novinkách v starostlivosti o stómiu a o produktoch. Môžete nás sledovať aj na sociálnych sieťach, kde sa veľa dozviete.



pravidelné zasielanie emailov



skvelé spojenie pomocou sociálnych sietí

Zadarmo edukácia online


Naše interaktívne webináre a vzdelávacie videá vám umožnia pozrieť si ich z pohodlia domova. Počas pobytu v nemocnici si môžete online prezerat vzdelávacie videá bezplatne na tabletoch, ktoré sú dostupné u zdravotníckeho pracovníka.



interaktívne webináre



program me+ recovery súbor cvikov pre rýchlejšiu rekonvalescenciu

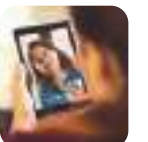

edukačné videá na rôzne témy



využitie tabletov v nemocniciach na edukáciu

Pomoc pri sprostredkovaní predpisu stomických pomôcok a ich bezplatné doručenie až domov

Naša diskretná doručovacia služba vám prinesie všetky stomické pomôcky, ktoré potrebujete, priamo k vašim dverám. Vieme, aké sú pre vás dôležité, a preto naše bezplatné, rýchle a spoľahlivé doručenie znamená, že sa nebudete musieť obávať, že ich nebudete mať k dispozícii.



spoľahlivé doručenie pomôcok až k vám domov

Propagačné materiály a vzorky produktov zadarmo

Domov z nemocnice odídete so stomickými pomôckami na 1 mesiac. Nebudete tak musieť hneď prvé dni po prepustení riešiť ich dostupnosť. Počas celého vášho života so stómiou tu budú pre vás špecialistky v zákazníckom centre. Môžete s nimi hovoriť o produktoch, starostlivosti o stómiu, aktiviách bežného života. Ak nebudú vedieť zodpovedať vaše otázky, tak vás nasmerujú na odborníkov vo vašom regióne. V prípade záujmu vám pošlú bezplatne vzorky našich produktov na vyskúšanie. Budete tiež dostávať bezplatný časopis Radim, ktorý je plný užitočných tipov a rád na život so stómiou.



zadarmo taštička s propagačnými materiálmi a drobnosťami na starostlivosť o stómiu



odborné poradenstvo o produktoch a bezplatné vzorky



časopis Radim

Profesionálna podpora a rady

Vieme si dohodnúť osobnú návštevu u nás v zákazníckom centre alebo online stretnutie so špecialistkou zákazníckeho centra, prípadne osobnú návštevu nášho zástupcu u vás doma.



online poradňa

Chceme k vám byť bližšie



Volajte bezplatne
0800 800 111
Pondelok - Piatok,
8.00 - 16.30 hod.



Email
stomalinka@convatec.com

Vždy budete informovaní



www.convatec.sk



facebook.com/convatecslovensko



instagram.com/convatecslovensko



prihláste sa ešte dnes
bezplatne do programu me+

Keď sa bezplatne zaregistrujete, aby ste boli členom me+, tak sa pripojíte k veľkej komunite kolegov stomikov a odborníkov na starostlivosť o stómiu. Nechceme, aby ste sa cítili osamelo na životnej ceste so stómiou.

Služby spoločnosti Convatec

Sme s vami počas celej vašej životnej cesty so stómiou

Convatec štartovacia taštička

Naša pomoc sa začína štartovacou taštičkou, ktorá bola vyrobená na základe vašich potrieb. Táto taštička obsahuje edukačné materiály, vzorky pomôcok a všetko, čo je potrebné vedieť na začiatok.

Convatec štartovacia taška

Pacient pri prepustení z ústavnej do domácej starostlivosti dostane so sebou prvú kompletnú výbavu stomických pomôcok do veľkej tašky (výpustné stomické a urostomické vrecká) alebo do malej tašky (uzavreté vrecká).




Bezplatná linka zákazníckeho centra Convatec

Potrebujete rýchlu pomoc a radu v oblasti sortimentu pomôcok, ich použitia a dostupnosti alebo informácie z oblasti ošetrovania stómii? Obráťte sa na pracovníčku bezplatnej linky zákazníckeho centra Convatec 0800 800 111. Pracovníčka bezplatnej linky vám poskytne potrebné informácie, uvedie limity na počty pomôcok, kódy výrobkov, nasmeruje vás k sestre v blízkosti vášho bydliska. V prípade zložitejších otázok konzultujeme naše odpovede s odborníkmi.

poradňa

Poradňa pre každého, kto sa potrebuje individuálne poradiť o stomických pomôckach, o ich použití, dostupnosti a opýtať sa na všetko z oblasti starostlivosti o stómiu v súvislosti s pomôckami.

Convatec na internete - www.convatec.sk

Aktuálne informácie o organizovaných akciách pre stomikov, prehľad sortimentu stomických pomôcok a produktov na vlhké hojenie rán Convatec, ukážky z časopisu Radim, informácie o priebehu dlhodobých programov uskutočňovaných spoločnosťou Convatec a ešte viac sa dozviete na internetovej adrese www.convatec.sk a na sociálnych sieťach  Facebook,  Instagram a  YouTube.

Časopis Radim

Pošlite nám vyplnenú prihlášku do programu me+ a budeme vám zadarmo posielat' na vašu adresu diskretné zabalený časopis Radim. V časopise nájdete cenné rady z oblasti ošetrovania stómii, informácie o pomôckach a ďalšie novinky a zaujímavosti zo života stomikov.



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo



Convatec na sociálnych médiách:

   **@convatecslovensko**



Objednanie
stomických
pomôcok



Individuálny
výber stomických
pomôcok



Poradenstvo
a podpora
od špecialistov

Doručenie Vašich stomických pomôcok až domov zadarmo

Služba spoločnosti Convatec

Volajte
0800 800 111

Píšte
stomalinka@convatec.com



Na bezplatnej linke
vám kvalifikovaná
špecialistka poskytne
potrebné informácie
a rady.



Zavolať nám tiež môžete,
ak máte podráždenú
kožu okolo stómie,
prípadne alergiu či vyrážku.

S výberom vhodnej stomickej
pomôcky vám pomôžeme
aj telefonicky.



Bezplatné doručenie
stomických pomôcok
kuriérom až priamo
k vám domov



0800 800 111

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac

Platné od 1. 1. 2024

Kolostómia (stómia na ľavej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný
Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou Esteem™+

90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek
60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek

Dvojdielny systém

10 ks podložiek a 60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek, prídržný opasok 2 ks ročne

Ileostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný
Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou Esteem™+

90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek
90 ks výpustných alebo 60 ks uzavretých vreciek

Dvojdielny systém

15 ks podložiek a 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek, prídržný opasok 2 ks ročne

Urostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný

30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek

Dvojdielny systém

15 ks podložiek a 30 ks vreciek, 10 ks nočných zberných vreciek, prídržný opasok 2 ks ročne



Produktové materiály,
naskenujte QR kód

Kolostómia (stómia na ľavej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou™ Esteem™+	90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek 60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek
Dvojdielny systém	10 ks podložiek a 60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek, prídržný opasok 2 ks ročne
Jednodielny detský systém	podľa potreby
Jednodielna krytka stómie	30 ks

Ileostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou™ Esteem™+	90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek 90 ks výpustných alebo 60 ks uzavretých vreciek
Dvojdielny systém	15 ks podložiek a 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek, prídržný opasok 2 ks ročne
Jednodielny detský systém	podľa potreby
Jednodielna krytka stómie	30 ks

Urostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný	30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek
Dvojdielny systém	15 ks podložiek a 30 ks vreciek, 10 ks nočných zberných vreciek, prídržný opasok 2 ks ročne

Na každú stómiu je možné predpísať príslušenstvo:

Pasta ochranná Stomahesive® 60 g (lepivá, vyrovnanie kožných nerovností)	F41229*	1 ks
Stomahesive® Seal tesniaci krúžok 48 mm/3 mm	F92108	10 ks
alebo Stomahesive® Seal tesniaci krúžok 48 mm/4 mm	F92109	10 ks
Pasta adhezívna Stomahesive® 30 g	F41230*	1 ks
Zásyp adhezívny Stomahesive® 25 g	F41228*	1 ks
Obrúsky na odstraňovanie náplastí ESENTA™	F91155	90 ks
a Sprej na odstraňovanie náplastí ESENTA™ 50 ml	F91154	1 ks
Sprej na ochranu kože ESENTA™ 50 ml	F91153	1 ks
alebo Obrúsky na ochranu kože ESENTA™	F91152	90 ks
Pohlčovač pachu StomOdor® Drops kvapky 35 ml	F96247	1 ks
alebo pohlčovač pachu StomOdor® Maxi sprej 210 ml	F96248	1 ks
alebo gélujúce/zápach pohlčujúce vankúšiky Diamonds™ 100 ks	F91151	100 ks/1 bal.
Pásy adhezívne Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 22 cm	F2087A	20 ks /každé 2 mesiace
alebo Pásy adhezívne Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 11 cm	F2086A	30 ks /každé 3 mesiace
Pena čistiaca StomFoam® 150 ml	F3555A	1 ks
Stomický prídržný opasok	F41299	2 ks ročne

Pomôcky označené* majú spoločný limit 360 gramov za rok. Evidenciu predpísaných pomôcok vedie ošetrojúci lekár v zdravotnej dokumentácii pacienta.



convatec
— forever caring —



PORADŇA
PRE KAŽDÉHO

Chceme k vám byť bližšie | Zastavte sa u nás osobne

Sme tu pre vás každý pracovný deň
od 8.00 - 16.30 hod.

Zákaznícke centrum Convatec
Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931
alebo nám napíšte email na
stomalinka@convatec.com
www.convatec.sk

PF
2024