

Appliceringsguide

Avelle™
Negative pressure, positive power

Det enda systemet som kombinerar sårbehandling med negativt tryck och Hydrofiber® Teknologi

1. Applicering av förbandet


Förberedelse av sårområdet

- Rengör såret enligt gällande lokala rutiner.
- Säkerställ att huden runt såret är torr.
- Avlägsna hår som kan påverka vidhäftningen negativt.

Val av förband

Tänk på följande vid valet av förband:

- Förbandsporten skall kunna appliceras över intakt hud.
- Sårets storlek bör inte vara större än 25% av förbandets absorberande yta.

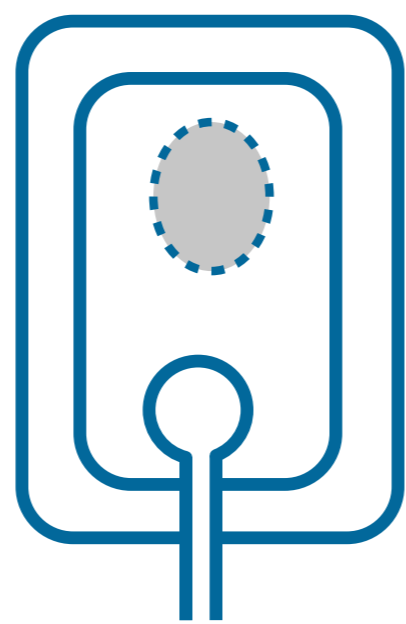

- Om Silesse™ hudbarriär används, skall denna användas i enlighet med bruksanvisningen. Låt huden torka helt innan du fortsätter.
- Avlägsna försiktigt skyddsfolien från vidhäftningen på förbandet.



Applicera förbandet över såret. Se till att porten är uppåt (om möjligt) och är placerad över oskadad hud.



Tryck fast och släta försiktigt ut förbandets kanter utan att förbandet veckar sig.

Lossa och placera om förbandet vid behov om veck uppstår.



Veck kan påverka förseglingen och leda till läckage.



Applicera fixeringsremarna på alla sidor av förbandet.

Avlägsna skyddsfolie 1. Placera fixeringsremarna och avlägsna sedan 2. Slutför genom att avlägsna skyddsfolie 3.



- Säkerställ 1 cm överlappning på alla sidor av förbandet.
- Se till att förbandsslangen inte fastnar i tejen. Fixeringsremarna bör användas för optimal försegling.

2. Anslut pumpen



Ta ut pumpen, pumpslangen och batterierna ur dess förpackning. Sätt in batterierna åt rätt håll i batterifacket på pumpens baksida och sätt dit locket.



Skruva ihop Luer kopplingarna för att säkert ansluta förbandet, pumpen och pumpslangen. Pumpen kan anslutas direkt till förbandet om en kortare förbindelse önskas.



3. Starta behandlingen



Håll in den blå knappen i 3 sekunder för att starta pumpen. Den gröna '✓' indikatorlampan börjar blinka som tecken på att pumpen fungerar. Det tar upp till 30 sekunder för att uppnå önskat negativt tryck och pumpen går aktivt under denna period.



Den gula '!' indikatorlampan blinker om det negativa trycket inte kan upprättas eller om ett läckage uppstår. Kontrollera att förbandet är tätt och att kopplingarna sitter som de ska.



Förbandet drar ihop sig och blir plattare när det negativa trycket upprättas.

4. Förbandsbyte


Förbandet skall bytas när det är kliniskt indikerat som vid mättat förband, läckage, vätska vid förbandsporten eller dålig vidhäftning.

- Förbandet kan sitta max 7 dagar.
- 3 - 4 dagar är normal tid mellan förbandsbyten.
- Tätare bytesfrekvens kan behövas beroende på mängd sårvätska.



Skruva isär koppling.

- Stäng av pumpen genom att hålla in den blå knappen i 3 sekunder.
- Koppla isär luer-kopplingen till förbandet.
- Lossa försiktigt de vidhäftande delarna på förbandet.

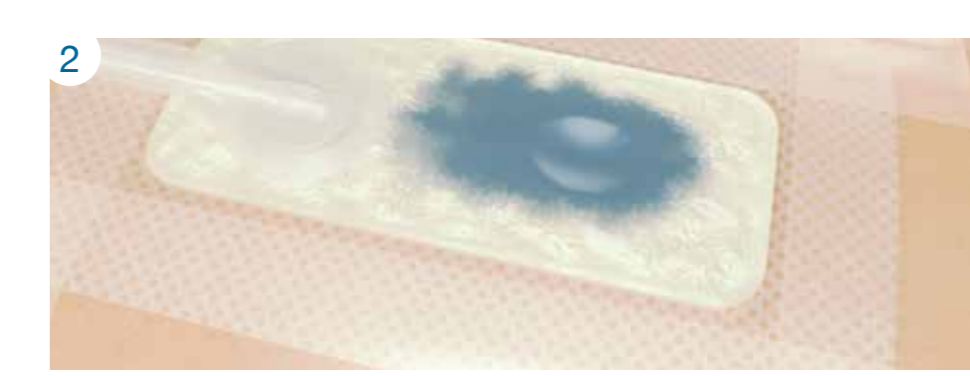

Byt förbandet innan sårvätska når förbandsporten.

5. Byte av pump



- Pumpen har 30 dagars användningstid från det att den startas.
- Batteribyte kan behövas inom dessa 30 dagar.
- Den gula indikatorlampan kommer att blinka när batterinivån är låg.
- Byte bör ske inom 24 timmar



Efter 30 dagars användningstid kommer alla indikatorlampor att sluta blinka.

För att byta pump, skruva loss förlängnings-slangens koppling vid förbandet och koppla till en ny pump med den nya förlängnings-slangen.

6. Utfyllnad av sårkavitét och kompression



Djupare sår, upp till 2.0 cm, kan fyllas ut med AQUACEL® Extra™ förband eller AQUACEL® band. Gasvävsbaserade förband kan också användas. OBS! Utfyllnadsmaterialet skall bytas samtidigt som Avelle™ förbandet.

Avelle™ Systemet kan användas tillsammans med kompressionsbehandling. Säkerställ att förbandsslangen med tillhörande luer-koppling placeras utanför kompressionsbandaget

Visste du att?

Förbandskopplingen har en backventil. När pumpen kopplas bort från Avelle™ förbandet så kommer vakuumet bibehållas under minst 60 minuter.*1

Det är möjligt att duscha med förbandet. Stäng av och koppla bort pumpen med förlängningsslangen från förbandet innan duschen.

Efter duschen så kopplar du tillbaka pumpen med förlängningsslangen och startar Avelle™ pumpen igen.

Behöver du mer information?

Se bruksanvisning i pump- eller förbandsförpackningen för fullständig information.

Kontakta ConvaTecs kundservice eller din lokala representant för hjälp gällande Avelle™ NPWT system.

Om du vill veta mer och boka ett informationsmöte så ring vår kundservice på:

020 - 21 22 22