

Wound Hygiene™

– en tidig interventionsstrategi mot biofilm

1

Rengör

2

Debridera

3

Omforma

4

Lägg om

Fyra enkla steg


Du kan ge varje sår bästa möjliga förutsättning för läkning genom fyra enkla steg.

Vi förstår att biofilm är en stor bidragande orsak till att svårläkta sår inte läker. Vi anser att varje sår, oavsett hur utmanande det än är, kan förbättras i sin läkning.

Precis som vi dagligen utför vår basala hygien genom att tvätta våra händer, borsta tänderna och duscha, ska vi utföra basal hygien av våra sår för att hålla dem rena och ta bort biofilm.

Genom att implementera Wound Hygiene så kan du säkerställa att varje sår varje gång har bästa förutsättning för att kunna läka.

Det behöver inte vara komplicerat. Håll biofilmbaserad sårbehandling enkel.

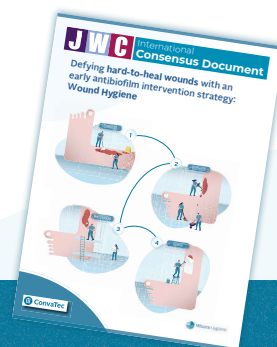

Nu publicerat som ett internationellt konsensusdokument.
Ladda ner på: www.woundhygiene.com

Implementera Wound Hygiene i ditt dagliga arbete

Wound Hygiene innefattar fyra steg:

1

Hud och sårrengöring

Borttagande av döda hudflagor och förhårdnader och dekontaminering av huden kring såret, helst med hjälp av sårrengörare för att förebygga återkolonisering av såret, görs vid varje förbandsbyte.

2

Debridering

Borttagande av nekrotisk vävnad, fibrin, främmande kroppar och biofilm vid varje förbandsbyte.

3

Omformning av sårkanterna

Uppfräschning av sårkanterna (skrapa för att säkerställa god blodtillförsel) genom att ta bort nekrotisk, skorpaktig och/eller överhängande kanter som kan innehålla biofilm och säkerställa att hudkanterna sluter an till såret för att främja epitelbildning och sårkontraktion.

4

Lägga om såret

Hantera återstående biofilm samt förebygg/fördröj återbildning av biofilm genom att använda biofilmsnedbrytande medel, lokala antiseptika och/eller lokala antimikrobiella förband.

De här fyra stegen ska upprepas regelbundet och användas frekvent för att:

1. Skapa och bibehålla en bra sår-läkningsmiljö



Alla sår, speciellt svårläkta sår, kommer dra fördel av Wound Hygiene



All vårdpersonal kan genomföra Wound Hygiene i alla miljöer



Stegen kan utformas för att passa din patient och statusen på dennes sår



Syftet med Wound Hygiene är bättre läkningsgrad/tid, att minska antibiotika-föreskrivningar och förbättra livskvaliteten och välbefinnandet för dina patienter

Läs mer på www.woundhygiene.com

