

Förberedelser



- Utöver produkten behövs handskar och glidmedel.
- **Avlägsna eventuell kvarvarande luft** från kuffen genom att ansluta sprutan till den vita porten markerad med 45 ml och aspirera.



- Töm sprutan på luft.
- Fyll sprutan med 45 ml ljummet kranvatten eller koksaltlösning.
- Fyll inte sprutan med mer än 45 ml.
- Anslut sprutan till den vita porten, **markerad med ≤ 45 ml.**



- Sätt fast uppsamlingspåsen ordentligt på kopplingen i änden av katetern.




- Lagg patienten på vänster sida. Om det inte är möjligt, placera patienten så att det går att komma åt rektum.
- Gör en manuell rektalundersökning för att bekräfta att kuffen kan föras in.

Införing



- Eventuella ineliggande eller analt placerade produkter måste tas bort innan Flexi-Seal[™] SIGNAL[™] FMS-enheten förs in.
- Veckla ut katetern i sin fulla längd så att den ligger plant på sängen med uppsamlingspåsen mot fotändan av sängen.
- För in ett behandskat pekfinger med glidmedel i den blåa fingerfickan på kuffen.
- Applicera glidmedel på kuffen.

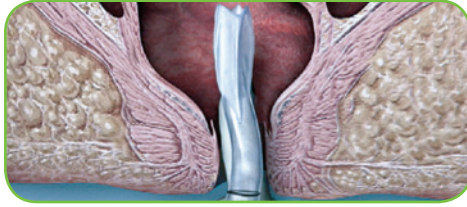

- För varsamt in katetern genom analöppningen tills den har kommit förbi den externa sfinktern och är väl inne i rektumampullen.
- Fingret kan hållas kvar i eller tas bort från rektum under det att kuffen utvidgas.




- Utvidga kuffen med ljummet vatten eller koksaltlösning genom att långsamt trycka in kolven på sprutan.
- **Fyll aldrig kuffen med mer än 45 ml!**



- När kuffen har uppnått optimal fyllnadsnivå (upp till 45 ml) kommer signalindikatorn på porten att spännas ut.
- Signalindikatorn kan spännas ut innan 45 ml har fyllts på, om det tillgängliga utrymmet för kuffen är mindre än kuffen själv. Avbryt fyllningen när signalindikatorn stannar i utspänt läge.
- Signalindikatorn kommer att förbli utspänd så länge kuffen har en optimal fyllnadsnivå.



- Om signalindikatorn inte spänns ut är ballongen inte tillräckligt fylld. Dra ut vätskan och fyll ballongen igen enligt beskrivningen.
- Om signalindikatorn expanderar avsevärt vid mindre volym än 30 ml, aspirera ut vätskan och positionera om kuffen i rektumampullen. Fyll därefter kuffen igen enligt beskrivningen.
- Om signalindikatorn töms eller ser ut att vara tömd, betyder detta att kuffen inte längre sitter optimalt placerad. Aspirera ut vätskan och fyll kuffen igen enligt beskrivningen.

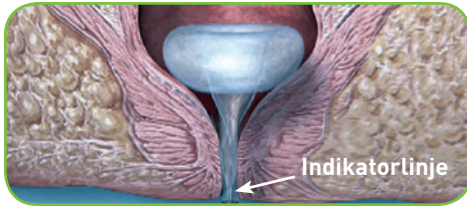

- Ta bort sprutan från signalindikatorporten.
- Dra försiktigt i silikonkatetern för att kontrollera att kuffen sitter säkert placerad i ampullen och ligger an mot botten i rektum.
- Notera lägesindikatorlinjen i förhållande till patientens anus.
- Håll ögonen på förändringar i lägesindikatorlinjen för att kunna upptäcka rörelser hos kuffen i patientens rektum. Detta kan betyda att kuffen behöver positioneras om.



- Lagg silikonkatetern utmed patientens ben.
- Undvik veck och andra hinder för flödet i katetern.



- Häng uppsamlingspåsen på sidan av sängen.
- Uppsamlingspåsen måste vara placerad lägre än patienten för att flödet i katetern ska vara obehindrat.

Skötsel och borttagande av systemet



BLÅ irrigationsport på kateter

- Skölj katetern genom att fylla sprutan med rumstempererat kranvatten, anslut sprutan till den **blåa irrigationsporten (märkt IRRIG)** och tryck ner kolven.
- Var noga med att inte koppla sprutan till den vita signalindikatorn (**märkt med ≤ 45 ml.**)
- Kontrollera enheten ofta för att kunna upptäcka obstruktion p.g.a. veck, fasta fekalier eller tryck utifrån.
- Spola katetern när det behövs för att upprätthålla ett obehindrat flöde av avföring ner i uppsamlingspåsen.



- Upprepa spolningsproceduren så ofta det behövs för att upprätthålla kateterns funktion.
- Om flödet inte fungerar trots upprepade spolningar bör enheten inspekteras med avseende på eventuell yttre obstruktion t.ex. tryck från patientens kropp eller något föremål, eller därför att diarrén har upphört.
- Om man inte kan hitta orsaken till obstruktionen bör användningen av katetern avslutas.



- Byt uppsamlingspåse vid behov.
- Sätt på locket på den använda påsen.
- Kassera påsen enligt lokala föreskrifter för hantering av medicinskt avfall.



- Innan katetern tas bort från rektum måste kuffen tömmas.
- Koppla sprutan till signalindikatorn och aspirera försiktigt ut allt vatten från kuffen.
- Koppla loss sprutan och kasta den.
- Fatta tag i katetern så nära patienten som möjligt och dra den långsamt ut ur anus.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för hantering av medicinskt avfall.

Administrering av läkemedel




- Förbered systemet för läkemedelsadministrering genom att spola irrigationsslangen med 10 ml rumstempererat vatten.
- Ta ur slangklämman från setets förpackning. Observera att slangklämman har två skårar och därmed två låspositioner. Placera slangklämman löst runt katetern vid den svarta indikatorlinjen. Låsändan av slangklämman ska vara placerad på samma sida som den svarta indikatorlinjen.
- Stäng slangklämman i den första låspositionen. Det ska höras ett klick som bekräftar att klämman är stängd.
- Gör i ordning en ny spruta med läkemedlet som ordinerats av läkaren. Doseringen måste kontrolleras av läkare.
- Anslut sprutan med läkemedlet till den blåa irrigationsporten (markerad med "IRRIG."). Tryck in kolven på sprutan för att administrera läkemedlet enligt läkarens ordination.
- När allt läkemedel har instillerats tar du bort sprutan och kasserar den enligt klinikens rutiner. För att säkerställa



- att allt läkemedel levereras i rektum ska du omedelbart spola irrigationsslangen med minst 50 ml rumstempererat vatten.
- Stäng sedan slangklämman helt genom att låsa den i den andra låspositionen. Det ska höras ett andra klick som bekräftar att klämman är helt stängd. Kontrollera att inget läkemedel rinner tillbaka genom katetern.
 - Låt läkemedlet ligga kvar i rektum under den ordinerade tiden.
 - Öppna därefter slangklämman och ta bort den från katetern. Spola irrigationsslangen igen med 10 ml vatten.

Provtagning

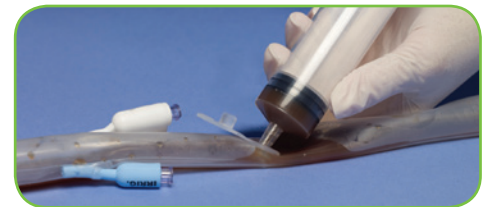

- För att kunna ta ett avföringsprov behöver du en luer-slip-spruta, vilket inte medföljer i produktens förpackning.
- Öppna locket på kateterns provtagningsport. Avlägsna eventuell kvarvarande luft från luer-slip-sprutan genom att trycka in kolven innan du sätter in sprutan i provtagningsporten.
- Tryck spetsen på sprutan genom slitisen inuti provtagningsporten så att den hamnar inne i katetern.
- Ta avföringsprovet genom att dra tillbaka kolven på sprutan.
- Dra ut sprutan och stäng locket till provtagningsporten.
- För över avföringsprovet till en uppsamlingsbehållare enligt klinikens rutiner.
- Kassera provtagningsprutan enligt klinikens rutiner.

