

Behandlingsstrategi från ConvaTec

Perfekt
samarbets-
partner



AQUACEL®
förband är
lösningen

Ytliga sår



Hantera sårvätska



Hantera sårvätska, infektion och biofilm



Djupa sår, mycket sårvätska




Sår med kavitet



Kan användas för behandling av bensår, trycksår, fotsår hos diabetiker, maligna sår, post-operativa sår och sårkaviteter

Tips:

- Förbandet bör täcka såret med minst 1 cm marginal utanför sårkanten.
- Applicera AQUACEL® Extra förband i flera lager för ökad absorption.
- Önskas antimikrobiell effekt, applicera AQUACEL® Ag+ förband närmast sårbädden.
- AQUACEL® förband kan förfuktas med NaCl eller sterilt vatten.
- Kan sitta i upp till 7 dagar eller byts när det är kliniskt indikerat.

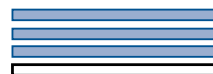

ConvaTec Sweden AB. Box 15138 167 15
Bromma
Kundservice: 020-21 22 22
convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.se

® och TM är varumärken tillhörande ConvaTec Inc.
©2017 ConvaTec Inc. AP-015649-SC